



1 Diese einfache Anleitung hilft Ihnen, Herpatch korrekt anzuwenden und eine gute Haftung des Pflasters sicherzustellen.



2 Die betroffene Hautstelle vor der Anwendung reinigen oder mit Wasser abspülen.



3 Nicht abtrocknen! Die Stelle muss feucht bleiben, damit das Pflaster gut haften kann.



4 Eine Einzelverpackung abtrennen, die Folie abziehen und das Pflaster herausnehmen. Die der dünnen, grauen Folie zugewandte Seite ist leicht gekrümmt.



5 Das Pflaster für 2-6 Sekunden in Wasser tauchen, um die Haftfähigkeit zu erhöhen.



6

Das Pflaster mit der nach innen gekrümmten Seite behutsam mit den Fingern auf die betroffene Stelle aufdrücken. Dabei darauf achten, dass sich keine Luftblasen bilden. Falls nötig zusätzlich anfeuchten.



7

Das Pflaster löst sich über einige Stunden hinweg auf.



8

Sollte sich das Pflaster lockern, mit Wasser oder Speichel erneut anfeuchten.



9

Pro Tag 2 Pflaster (oder bei Bedarf auch mehrere) verwenden.



10

Das Pflaster ist selbstauflösend. Falls nötig kann es jederzeit mit etwas Wasser entfernt werden.

Einen Film zur Anwendung finden Sie auch auf www.herpatch.com

ANWENDUNGSGEBIET: Herpatch ist ein selbstauflösendes Pflaster, das eine physikalische Barriere rund um die betroffene Hautstelle bildet und die Mikroumgebung der verletzten Haut reguliert. Dadurch werden die Herpesbläschen schmerzempfindlicher und ihre Heilung wird gefördert.

WARNHINWEISE: Nicht versuchen, das Pflaster abzureißen, da dadurch die Herpesbläschen aufreißen können. Das Pflaster kann mit etwas Wasser vorsichtig entfernt werden. Wenn die Herpesbläschen und/oder die Symptome länger als 12 Tage andauern, ist ein Arzt zu konsultieren. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht im Mund, auf Schleimhäuten oder im Genitalbereich anwenden. Während der Schwangerschaft und Stillzeit vor der Anwendung einen Arzt konsultieren. Bei Kindern unter 12 Jahren nur unter Aufsicht anwenden. Für Kinder unter 4 Jahren vor der Anwendung einen Arzt konsultieren. Trocken und kühl lagern, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Pflaster aus beschädigten Verpackungen nicht verwenden. Wenn Schmerzen und/oder Hautirritationen auftreten, während das Pflaster angewendet wird, durch Abwaschen vollständig entfernen. Wenn die Probleme bestehen bleiben, einen Arzt konsultieren. Nicht 10 oder mehr Pflaster gleichzeitig verwenden.

ALLGEMEINE VORSICHTMASSNAHMEN: Berühren Sie die Herpesbläschen nicht, da dadurch die Gefahr besteht, dass Sie weitere Hautstellen infizieren. Wenn Sie ein Herpesbläschen berührt haben, waschen Sie umgehend Ihre Hände. Vermeiden Sie generell die Berührung Ihrer Augen. Halten Sie sich von Neugeborenen fern. Teilen Sie keine Dinge, die mit Ihrem Speichel in Berührung gekommen sind (z. B. Zahnbürste, Trinkgläser, etc.). Vermeiden Sie intensiven physischen Kontakt. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung. Personen mit ernsthafter Lippenherpesinfektion und/oder einer Infektion, die sich bereits auf andere Hautbereiche ausgeweitet hat, sollten sich in ärztliche Behandlung begeben.

HERSTELLER: Sylphar N.V. - Xavier De Cocklaan 42 - 9831 Deurle - BE

VERTRIEB: Deutsche Chefaro Pharma GmbH, 45725 Waltrop
Deutsche Chefaro Pharma GmbH ist ein
Tochterunternehmen der Omega Pharma N.V.

CE 0197