

# ORALMEDIC®

Stoppt den Schmerz im Mund oft schon in Sekunden

## Gefüllte Applikatoren für eine gezielte Anwendung an der entzündeten Mundschleimhaut.

Eine einzige Anwendung von **ORALMEDIC®** stoppt den Schmerz im Mund oft schon in Sekunden (bei Aphthen oder kleinen Entzündungen der Mundschleimhaut).

**ORALMEDIC®** bildet eine Schutzschicht über der entzündeten Stelle (z. B. einer Aphthe) und schafft so günstige Bedingungen für eine natürliche Heilung.

**ORALMEDIC®** ist zur Behandlung von Aphthen oder kleinen Entzündungen der Mundschleimhaut bestimmt. Nicht geeignet zur Behandlung von Fieber- und Herpesbläschen.

### Gebrauchsanweisung:

#### Wichtig - Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung vollständig und sorgfältig durch



1. Trocknen Sie die entzündete Stelle mit dem Wattestäbchen.



2. Halten Sie das gefüllte Applikator-Stäbchen leicht schräg und knicken Sie es an der Markierung vorsichtig ab. Achten Sie darauf, das Stäbchen möglichst weit vom Körper (insbesondere vom Gesichts- und Augenbereich) weg zu halten. **ORALMEDIC®** fließt nun zur gegenüberliegenden Seite des Applikators.



3. Drücken Sie den Applikator vorsichtig für 5-10 Sekunden auf die entzündete Stelle und achten Sie darauf, dass diese vollständig bedeckt wird. Direkt beim Auftragen spüren Sie ein kurzes Brennen.



4. Spülen Sie den Mund sorgfältig mit Wasser aus.

5. Entsorgen Sie den Applikator über den Hausmüll.

**Hinweis:** Im Normalfall ist eine einzige Anwendung ausreichend. Falls der Entzündungsschmerz direkt nach Ausspülen des Mundes bestehen bleibt, ist davon auszugehen, dass die entzündete Stelle nicht vollständig bedeckt wurde. In diesem Fall sollten Sie die Anwendung mit einem neuen Applikator wiederholen (anschließend wieder spülen, Gebrauchsanweisung siehe oben), um die Behandlung abzuschließen. Behandeln Sie dieselbe entzündete Stelle nicht mehr als einmal. Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die Schmerzen bestehen bleiben. Vermeiden Sie den Kontakt mit Kleidungsstücken, da diese verfärbt oder beschädigt werden könnten.

**Wichtige Warnhinweise:** Nicht anzuwenden bei Schwefel-Allergie, während der Schwangerschaft oder bei Kindern unter 12 Jahren. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen. Für den Fall, dass Augen mit **ORALMEDIC®** in Kontakt gekommen sind, entfernen Sie gegebenenfalls sofort Kontaktlinsen, spülen Sie die Augen mindestens für 15 Minuten mit Wasser aus und suchen Sie umgehend Ihren Arzt auf.

**ORALMEDIC®** ist ausschließlich für die Anwendung auf der Mundschleimhaut bestimmt. Eine erfolgreiche Behandlung erkennt man an einer weißen Schicht auf und um die Aphthe herum. Es können lokale Hautreizungen oder eine leichte Schwellung bei der Anwendung auftreten. Sollten übermäßige Hautreizungen auftreten, spülen Sie den Mund gründlich mit viel Wasser aus. Wenn sich die entzündete Stelle innerhalb von 10 Tagen nicht gebessert hat, suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Zahnarzt auf.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.  
Bei Raumtemperatur und an einem trockenen Ort lagern.



**Inhaltsstoffe:** HYBENX (Hydroxybenzolsulfonsäure, Hydroxymethoxybenzolsulfonsäure, Schwefelsäure, Wasser, FD&C Red40).

**Diese Packung beinhaltet:** 3 einzelverpackte Applikatoren, die jeweils 0,2ml HYBENX-Säurelösung enthalten. 3 Wattestäbchen.



© EPIEN Medical, Inc. 4225 White Bear Parkway, Ste 600, St. Paul, MN 55110 USA [www.epien.com](http://www.epien.com)

HYBENX ist eine eingetragene Marke von EPIEN Medical, Inc.



QNET BV, Hommerterweg 286, 6436 AM Amstenrade, Niederlande  
Stand der Information: 06/11, Form Ger\_L01

Vertrieb in Deutschland: Paracelsia Pharma GmbH, 45725 Waltrop