

Femtest steht seit Jahrzehnten für Qualität und Vertrauen!

- Zuverlässigkeit über 99%
- XXL-Urinabsorber besonders saugstark und dadurch ausgezeichnet für die Urinstrahl-Methode geeignet, d.h. der Urin muß nicht in einem Becher gesammelt werden.
- Griffmulden für angenehme Handhabung!
- Positives Ergebnis bleibt unverändert und kann zur Erinnerung aufbewahrt werden.



Knick-Griff



XXL-Absorber



Griffmulden




Welcher Test ist für mich der Richtige?

- **Femtest Schwangerschaftstest:** Wenn Sie ab dem Tag des Ausbleibens der Periode testen
- **Femtest Frühtest:** Wenn Sie bereits bis zu 4 Tage vor Ausbleiben der Periode testen



Einfachste Anwendung:

- Den Absorber 5 Sekunden in den Urinstrahl halten
- Nach 5 Minuten können Sie das Ergebnis ablesen:

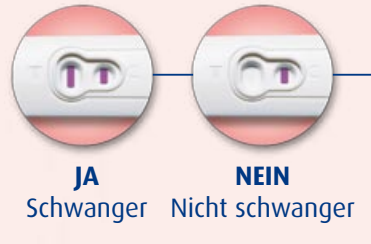

Wir beraten Sie gerne.

Deutsche Chefaro Pharma GmbH · 45725 Waltrop
www.femtest.de

Femtest

SCHWANGERSCHAFTSTEST


Schwanger?

Kleiner Ratgeber
zum Thema
Schwangerschaftstest

Der weibliche Zyklus

- Ein Monatszyklus dauert im Durchschnitt 28 Tage, kann jedoch auch kürzer oder länger sein.
- Der Eisprung erfolgt ungefähr in der Mitte des Zyklus.
- Die fruchtbare Phase beträgt im Durchschnitt 7 Tage und liegt vor und nach dem Eisprung.

Beispielhafte Darstellung eines 28-tägigen Zyklus

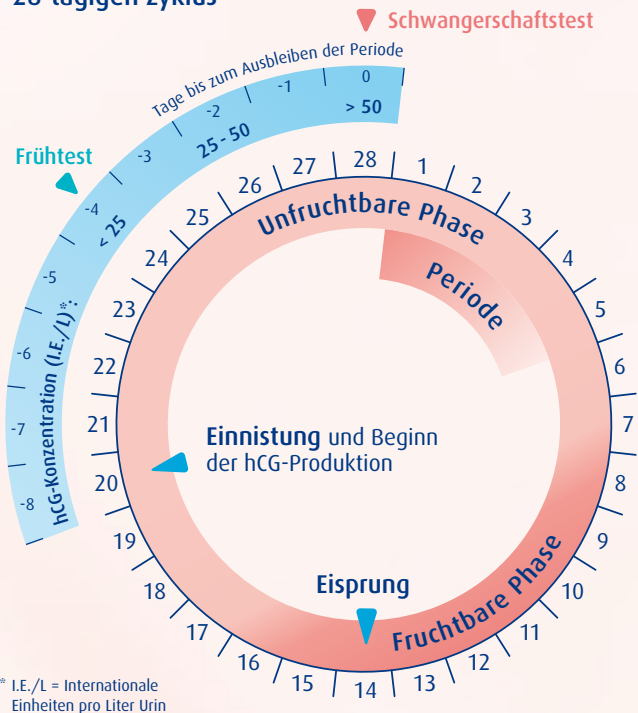

Wie funktioniert ein Schwangerschaftstest?

- Wenn eine Frau schwanger wird, beginnt ihr Körper das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Chorion Gonadotropin) zu produzieren. Dieses ist verantwortlich für die Erhaltung der Schwangerschaft.
- Das hCG gelangt über den Blutkreislauf in die Nieren und wird später mit dem Urin ausgeschieden, so dass ein Heimschwangerschaftstest das Hormon im Urin nachweisen kann.



- Gemessen wird die hCG-Konzentration in Internationalen Einheiten pro Liter Urin (I.E./L).
- Die Konzentration des Schwangerschaftshormons steigt im ersten Drittel der Schwangerschaft stetig an. Zwischen der achten und zehnten Woche wird die maximale Konzentration erreicht.



Wann kann ich testen, ob ich schwanger bin?

Eine Schwangerschaft kann grundsätzlich ab einem Niveau von ca. 10 I.E./L festgestellt werden. Diese Konzentration befindet sich ungefähr 10 Tage nach der möglichen Empfängnis und damit in den meisten Fällen 4 Tage vor Fälligkeit der Periode im Urin.

Wann Sie testen können, hängt außerdem davon ab, ob Sie mit einem regulären Schwangerschaftstest oder mit einem Frühtest testen.

- **Schwangerschaftstest:** Es kann ab dem Tag des Ausbleibens der Periode getestet werden.
- **Frühtest:** Eine mögliche Schwangerschaft kann bereits bis zu 4 Tage vor Fälligkeit der Periode bzw. 10 Tage nach der Empfängnis festgestellt werden.

Wenn Sie vor Fälligkeit der Periode testen, ist jedoch Folgendes zu beachten:

- Bei manchen Frauen steigt die Konzentration des hCG langsamer an, so dass unter Umständen vor Fälligkeit der Periode die im Urin vorhandene Menge noch nicht zum Nachweis des Schwangerschaftshormons ausreicht. Dies kann in seltenen Fällen dazu führen, dass der Test ein negatives Ergebnis anzeigt, obwohl Sie schwanger sind.
- Viele Schwangerschaften werden in der Frühphase, d.h. vor Fälligkeit der Periode, vom Körper abgestoßen und enden (von der Frau völlig unbemerkt) auf natürliche Weise. Der Test zeigt unter Umständen ein positives Ergebnis an, obwohl keine Schwangerschaft (mehr) vorliegt.



Zur Berechnung und Kontrolle Ihres persönlichen Zyklus empfehlen wir Ihnen die Verwendung des Femtest Zykluskalenders.