

Wie funktioniert WARTNER?

Mit WARTNER können Sie Warzen (auch Fuß- und Dornwarzen) einfach, sicher und schnell zu Hause entfernen. Dabei kommt die gleiche Technik zum Einsatz, die auch von Ärzten bereits seit Jahren erfolgreich angewendet wird: Die Vereisung.

WARTNER vereist die Warze mit nur einer Anwendung bis zur Wurzel, dadurch fällt sie in der Regel innerhalb von 10-14 Tagen ab. Unter der Warze hat sich während dieser Zeit bereits neue, gesunde Haut gebildet.

Wie viele Warzen kann ich mit WARTNER vereisen?

Mit einer Packung WARTNER können Sie bis zu 12 Warzen bis zur Wurzel vereisen. Eine Packung WARTNER Kids reicht für 16 Vereisungen.

Darf die behandelte Hautpartie nass werden?

Ja. Man darf nach der Anwendung von WARTNER ohne weiteres duschen und schwimmen.

Wann ist WARTNER nicht zur Behandlung geeignet?

WARTNER sollte nicht angewendet werden:

- Bei Warzen auf empfindlicher Haut, wie zum Beispiel Gesicht, Hals, Achselhöhlen, Brust, Gesäß oder Genitalien
- Auf gereizter Haut oder an Stellen, die gerötet sind bzw. Anzeichen von Entzündungen wie Juckreiz oder Schwellungen aufweisen
- Auf dunklen Muttermalen, dunkel gefärbten, behaarten oder ungewöhnlichen Hauterkrankungen, die ähnlich wie Warzen aussehen
- Bei Kindern unter 4 Jahren
- Bei Diabetikern, da aufgrund der oft schlechten Durchblutung das vereiste Gewebe sehr langsam oder nicht vollständig verheilen kann.

Falls Zweifel bestehen, ob es sich um eine Warze handelt, konsultieren Sie bitte immer Ihren Arzt, bevor Sie WARTNER anwenden.

WARTNER, der Warzen-Spezialist: Bei jedem Warzen-Problem die richtige Wahl!

WARTNER gegen Warzen

- Für Erwachsene und ältere Kinder
- Für gewöhnliche Warzen

WARTNER gegen Fuß- und Dornwarzen

- Für Erwachsene bzw. Kinder mit hartnäckigen Warzen an den Füßen
- Generell für Fuß- und Dornwarzen



WARTNER Kids

- Für Kinder und schmerzempfindliche Erwachsene
- Für jüngere, gewöhnliche Warzen

Wir beraten Sie gerne:

Hersteller: Omega Teknika, Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Ireland
Vertrieb: Deutsche Chefaro Pharma GmbH, 45725 Waltrop

www.wartner.eu

WARTNER

Vereist die Warze
bis zur Wurzel mit nur
1 Anwendung



- **Bewährte Methode des Arztes**
- **Besonders sichere und einfache Anwendung durch patentierten Sprühkopf**

In 3 Varianten:

Gewöhnliche Warzen

Fuß- & Dornwarzen

Speziell für Kinder



Was sollte man über Warzen wissen?

Warzen sind harmlose Hautwucherungen, die von Humanpapillomaviren (HPV) verursacht werden. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Warzenarten, aber am häufigsten treten gewöhnliche Warzen und Dornwarzen auf.

Warzen sind eine alltägliche Hauterkrankung, von denen besonders Kinder und Jugendliche betroffen sind. Sie sind äußerst ansteckend und treten umso häufiger auf, je schwächer das Immunsystem ist. Sie können sich durch Berührung oder Kontakt mit der Haut bzw. Hautschüppchen von einer Person zur nächsten verbreiten oder auch von einem Körperteil auf einen anderen.

Welche Art von Warzen kann man mit WARTNER behandeln?



Gewöhnliche Warzen (Verrucae vulgares): Gewöhnliche Warzen treten meist an Händen oder auch Füßen auf und können relativ eindeutig an ihrer »blumenkohl-ähnlichen« Oberfläche erkannt werden.



Dornwarzen (Verrucae plantares): Dornwarzen (oft auch Fuß- oder Sohlenwarzen genannt) fühlen sich – ähnlich wie die gewöhnlichen Warzen – wie ein raues Knötchen an, treten aber nur an Füßen auf. Dornwarzen haben meist eine flache, glatte Oberfläche, sind oft von Hornhaut oder Schwielen bedeckt und wachsen dornartig in die Tiefe. Daher können sie beim Gehen starke Schmerzen verursachen.

WARTNER ist in 3 Varianten erhältlich:

Worin unterscheiden sich die 3 WARTNER Varianten?

Bei WARTNER gegen Warzen und WARTNER gegen Fuß- bzw. Dornwarzen ist das Vereisungsspray identisch, allerdings bietet Ihnen letzteres einige zusätzliche Hilfen, die die Wirksamkeit bei diesen hartnäckigen Warzen verstärken können:

- Eine Hornhautfeile zur eventuellen Vorbehandlung
- Größere Applikatoren, die größere Warzen bedecken und bei längerer Anwendung (s. Gebrauchsinformation) eine tiefere Vereisung erzeugen können
- 12 Komfortpflaster zum Schutz der behandelten Stelle, speziell bei Warzen unter dem Fuß.

WARTNER Kids hingegen bedient sich einer alternativen Vereisungstechnik. Dabei kommt ein anderer Wirkstoff zum Einsatz, durch den die Vereisungszeit auf nur 3 Sekunden verkürzt und das Schmerzgefühl deutlich reduziert werden kann. Daher ist WARTNER Kids besonders gut für Kinder geeignet.

Welches WARTNER ist für mich das Richtige?

Prinzipiell können Sie mit keinem WARTNER falsch liegen, da alle auf dem Prinzip der Vereisung beruhen. Wir würden Ihnen aber empfehlen, einfach nach Lage der Warze bzw. zu behandelnder Person zu entscheiden.

Befindet sich Ihre Warze am Fuß, ist WARTNER gegen Fuß- und Dornwarzen in jedem Fall die richtige Wahl. Für alle anderen Warzen empfehlen wir das reguläre WARTNER. Und bei Kindern bzw. schmerzempfindlichen Erwachsenen ist WARTNER Kids die geeignete Variante zur Entfernung gewöhnlicher Warzen.

Egal für welches WARTNER Sie sich entscheiden – die Anwendung ist denkbar einfach.

WARTNER gegen Warzen

- Vereist die Warze bis zur Wurzel
- 1 Anwendung ist meistens ausreichend
- Bewährte Methode des Arztes

Anwendung:



1 – Setzen Sie den Schaumstoffapplikator auf den Plastikhalter.

2 – Drücken Sie den Plastikhalter mit dem Schaumstoffapplikator für 3 Sekunden fest in die Spraydose.

3 – Halten Sie die weiße Spitze des Schaumstoffapplikators auf die Warze. Die maximale Vereisungszeit entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation.

WARTNER gegen Fuß- & Dornwarzen

- Speziell gegen Fuß- und Dornwarzen
- Intensivere Vereisung durch größere Applikatoren
- Hornhautfeile und Komfortpflaster zur gezielten Vor- und Nachbehandlung

Anwendung:

Da die Vereisungstechnik von WARTNER gegen Warzen und WARTNER gegen Fuß- und Dornwarzen identisch ist, ist auch die Anwendung die gleiche. Für die Behandlung von Fuß- oder Dornwarzen empfehlen wir Ihnen jedoch einige zusätzliche Schritte:

- Zur Vorbehandlung kann, speziell bei stark verhornten Füßen, ein Fußbad sehr hilfreich sein.
- Anschließend können Sie die Hornhaut mit der beiliegenden Hornhautfeile leichter entfernen.
- Außerdem ist es oft sinnvoll, bei Warzen unter der Fuß-sole nach der Vereisung eines der beiliegenden Komfortpflaster anzubringen.

WARTNER Kids – Speziell für Kinder

- Nur 3 Sekunden Vereisungszeit
- Anwendung in 3 einfachen Schritten
- Deutlich weniger schmerzhaftere Vereisung

Anwendung:



1 – Drehen Sie das blaue Rädchen auf der flachen Seite in Pfeilrichtung bis es einrastet.

2 – Setzen Sie den durchsichtigen Aufsatz so auf die Warze, dass sich diese genau in der Mitte der Öffnung befindet.

3 – Drücken Sie den blauen Hebel soweit wie möglich herunter. Daraufhin strömt für voreingestellte 3 Sekunden kaltes Gas aus.



Bitte lesen Sie vor der Anwendung die ausführliche Gebrauchsinformation aufmerksam durch.